

Ovulazione e analisi del ciclo

con l'aiuto di BabyComp



- Home
- Contracezione
- Procreazione
- Info Medica
- Prodotti
- Prezzi Shop
- Domande-Risposte
- Area Clienti
- Area Stampa
- Varie



La vita ha il suo corso..

Il rapporto di coppia va bene,
perché la felicità sia completa manca
solo un bambino.

Ma cosa fare quando sembra non arrivare?

Perché non rimango incinta ?

Ho l'ovulazione ?

Quando ?...

Troppo spesso capita alla donna di accorgersi di sapere molto poco sull'andamento del proprio ciclo mestruale, quando tenta di rimanere incinta, avendo rapporti nei giorni in cui crede di avere l'ovulazione, e non ci riesce.

Non tutte le donne sanno che avere le mestruazioni più o meno regolari non significa necessariamente avere l'ovulazione.

Si aggiunge che la maggior parte delle donne non è consapevole che avere l'ovulazione non è sufficiente per rimanere incinta.

Ci accade molto spesso che donne che utilizzavano, per la procreazione, metodi manuali di regolazione naturale della fertilità o test dell'ovulazione, chiedano informazioni sui nostri indicatori di fertilità perchè non hanno alcuna idea del perchè non siano rimaste incinte.

"... abbiamo avuto i rapporti quando pensavamo il test segnava l'ovulo, oppure quando il muco corrispondeva... eppure le mestruazioni sono comparse normalmente.

Perchè?

Cosa abbiamo sbagliato?

Avrò avuto veramente l'ovulazione?

Abbiamo avuto troppi rapporti?

Troppo spesso? Troppo tardi?

Perchè???"

La donna si sente sola con il suo problema...

Queste sono le domande che il più delle volte si pongono le donne che per mesi, inutilmente, provano... provano ... e niente: le mestruazioni arrivano nuovamente...

Trattasi per lo più di donne sole con il loro ciclo, che non hanno nessuno a cui chiedere un'informazione, una consulenza, un consiglio (... non sono clienti BabyComp)

Donne che quando vanno dal loro ginecologo, se non sono già al limite dell'età fertile, si sentono rispondere "provi per almeno un anno, poi decideremo il da farsi..."

"... un anno? Un anno può essere un'eternità... soprattutto quando ormai mi sembra di essere circondata solo da donne incinte e con bambini in braccio, di coppie con passeggini... eppure quasi tutte le mie amiche ci sono riuscite, ormai sono l'unica che non può stringere tra le sue braccia un bambino ... possibile che un medico queste cose non le capisca... il chiedo

Audio On

SCARICA con



SEGNALA QUESTO
SITO AD UN AMICO

Introduci la E-mail
del destinatario:

Segnala



BabyComp



Foto 1

Indicazione della fase luteinica



Foto 2

fisso è lì..."

Queste sono i pensieri, o meglio i crucci, che hanno solo le donne, che, già prima, non utilizzavano uno dei nostri indicatori di fertilità: [Pearly](#), [LadyComp](#) o [BabyComp](#).

La soluzione: un aiuto concreto per realizzare il sogno di avere un bambino...

Le donne che usano LadyComp e ancor più quelle che usano BabyComp (Pearly viene utilizzato per evitare una gravidanza e non da informazioni mirate riguardo la pianificazione) non solo sanno quando inizia e finisce la finestra fertile del ciclo, ma capiscono anche se hanno o meno regolarmente l'ovulazione e se dal punto di vista ormonale ci sono i presupposti perchè possano rimanere incinte e diventare quindi mamme.

Con i nostri apparecchi infatti si può anche controllare se nella fase luteinica del ciclo c'è una sufficiente stabilità progesteronica necessaria, in caso di concepimento, per l'annidamento dell'ovulo concepito nell'utero e quindi per il proseguimento della gravidanza

Premesso che tutti e tre i nostri apparecchi sono indicatori di fertilità computerizzati con lo stesso programma (software) di base, dal cui utilizzo la donna deduce se è fertile o meno, vale la pena di investire qualche parola nello spiegare perchè LadyComp e BabyComp vengono considerati più adatti di Pearly per la pianificazione mirata di una gravidanza e come aiuto alla donna per monitorare l'ovulazione e per rimanere incinta.

Pearly indica semplicemente alla donna, quotidianamente, in quali giorni è fertile e in quali invece sicuramente non lo è.

Succede spesso che coppie, senza problemi di ridotta fertilità, che utilizzavano Pearly per evitare la contraccezione naturale sicura, a tempo debito, hanno deciso di usarlo "al contrario" cioè per la procreazione e la donna è rimasta incinta. Si tratta però quasi sempre di donne che già prima, attraverso l'utilizzo di Pearly, avevano dedotto di essere fertili, che magari da tempo non prendevano contraccettivi ormonali, e che soprattutto, a livello di coppia, non avevano problemi di fertilità.

Lunghezza della fase postovulatoria



Foto 3

Segnalazione della data di prevista ovulazione



Foto 4

La coppia. Non sempre il problema è la donna...

Perchè parliamo di coppia?

Perchè oggi molto spesso succede (in oltre il 40% dei casi) che se una coppia ha difficoltà di concepimento è perchè la cosa coinvolge anche l'uomo. Sempre più uomini hanno problemi di ridotta fertilità. Ecco che quindi la coppia che vuole procreare, la maggior parte delle volte, è chiamata ad operare su due fronti:

- Da una parte monitorando il ciclo della donna (con controlli specifici sull'ovulazione e la stabilità nella fase luteinica) e
- d'altra parte concentrando i rapporti nella fase ottimale per il concepimento per rafforzare così la capacità fecondativa degli spermatozoi.

In questi casi l'utilizzo di LadyComp o di BabyComp è più consono perchè, avendo il doppio di memoria rispetto a Pearly, danno alla donna anche informazioni sul suo ciclo (confermano che ci sia effettivamente l'ovulazione e controllano che non ci sia insufficienza luteinica nel ciclo) e sulla pianificazione, dati di analisi utili anche per il ginecologo.

Questi dati vengono evidenziati direttamente sul display dell'apparecchio (di seguito specificheremo quali in dettaglio), oltre che chiaramente sotto forma di analisi retrospettiva sul prospetto di analisi degli ultimi 24 cicli che noi stampiamo gratuitamente alle donne che acquistano sia LadyComp che BabyComp in Italia.

Qualora le informazioni ricevute da LadyComp risultano essere troppo

Inserimento RS rapporto sessuale



Foto 5

esigui, si può in qualsiasi momento richiedere alla BabyComp srl di ampliare il programma, senza perdita dei dati già inseriti ed elaborati.

Le clienti che hanno uno dei nostri apparecchi per la procreazione o il monitoraggio del ciclo vengono inoltre aiutate dagli operatori del nostro Servizio di Assistenza Clienti - che risponde al numero verde gratuito 800 217721 (da fisso) oppure allo 0472 831010 (da cell.) nell'interpretazione di quelli che sono i dati di controllo del ciclo e della pianificazione che solo LadyComp e ancor più BabyComp compilano in automatico, man mano che vengono utilizzati dalla donna.

Gli indicatori di fertilità tecnologicamente più avanzati: LadyComp e BabyComp utilizzati per la pianificazione mirata della gravidanza.

La donna che, anche prima di cercare un bambino, usava LadyComp o BabyComp

Pianificazione mirata corretta
(Indicazione già dopo 5 giorni)



Foto 6

(Foto 1) come metodo contraccettivo sicuro e naturale ha imparato, attraverso il suo utilizzo quotidiano, a conoscere bene le dinamiche del suo ciclo mestruale e quindi, il giorno in cui con il suo compagno decide di allargare la famiglia, è certamente avvantaggiata.

La donna che invece ha il 1° approccio con BabyComp perchè è già da un po' che sta cercando di rimanere incinta e non ci è ancora riuscita, deve ancora imparare a conoscere le potenzialità dell'apparecchio e quindi ad apprezzarlo.

La stessa cosa vale, in un certo modo, anche per l'apparecchio che ha ovviamente una fase di apprendimento nel corso della quale, memorizzando i dati della donna, riesce a definire sempre più esattamente l'inizio e la fine della finestra fertile del ciclo. Per abbreviare la fase di apprendimento, prima di iniziare con l'utilizzo di BabyComp, è possibile caricare nell'apparecchio i dati mestruali relativi ai cicli precedenti degli ultimi 250 giorni (più di 9 mesi). Sin dal 1° ciclo completo di utilizzo, la donna saprà invece se ha ovulato o meno e se la pianificazione mirata è stata corretta (cioè se ha avuto un rapporto sessuale in fase ovulatoria o poco prima).

Probabile gravidanza dopo 15 giorni



Foto 7

BabyComp è un vero e proprio computer, con un programma installato che è stato creato sulle base di esperienza ed analisi clinica di quasi 1.000.000 di cicli di migliaia di donne diverse.

BabyComp, anche se è molto semplice da usare, ha incorporata un'intelligenza artificiale (sistema neuronale intelligente) grazie alla quale riesce ad adattarsi totalmente a quelle che sono le caratteristiche uniche del ciclo della donna che lo usa, facendo un'analisi del ciclo sia a livello pronostico che retrospettivo. Difatti è l'unico nel suo genere che oltre a pronosticare l'ovulazione, specifica esattamente quando c'è stato lo scoppio del follicolo e da lì parte il lavoro di controllo sulla fase luteinica del ciclo.

L'apparecchio può essere utilizzato solo da una donna per volta, perchè il suo lavoro di calcolo ed analisi si conforma alla sua unicità.

Rimanere incinta con BabyComp...

BabyComp ha una memoria fissa per i dati della donna di quasi 20 anni. Esegue calcoli di analisi e controllo del ciclo mestruale e della pianificazione sulla base delle informazioni relative agli ultimi 20 cicli, adattandosi quindi ai mutamenti ormonali e del ciclo mestruale che, inevitabilmente, ci sono con il passare del tempo.

BabyComp ha anche una memoria temporanea di 250 giorni a cui si può accedere direttamente.

Sin dal 1° giorno in cui la donna usa BabyComp riceve informazioni sul suo ciclo e sulla sua ovulazione.

Per aiutare la coppia nella pianificazione BabyComp:

1. già in fase mestruale, affinché la coppia possa avere dei rapporti

Gravidanza sicura dopo 18 giorni



Foto 8

Data del Parto e Prognosi del sesso del nascituro



Foto 9

mirati, comunica alla donna in quale giorno l'apparecchio attende l'ovulazione

2. indica quali sono i giorni ottimali per il concepimento, tenendo conto dell'oscillazione dell'ovulazione
3. le fa capire se l'ovulazione è ritardata (questo capita quando le donne hanno talvolta cicli più lunghi e irregolari)
4. le indica quando la finestra fertile del ciclo è finita.

In fase post-ovulatoria le conferma invece quando l'ovulazione è avvenuta.

BabyComp informa, inoltre, la donna sull'andamento ormonale nella fase luteinica o postovulatoria ([Foto 2](#) e [Foto 3](#)). La sufficienza e stabilità progesteronica in questa fase del ciclo è molto importante perchè avvenga l'annidamento del follicolo fecondato e quindi ridotta a priori la possibilità di un aborto spontaneo nelle prime settimane di gravidanza.

Un'eventuale insufficienza o instabilità nella fase luteinica del ciclo mestruale viene infatti evidenziata dall'apparecchio e questo consente alla donna già a priori di intervenire per porvi rimedio.

La nostra esperienza di ormai 20 anni ci ha insegnato che per tante donne avere questa informazione a titolo preventivo, ancora quando BabyComp veniva utilizzato come metodo contraccettivo naturale e sicuro, è stato molto utile per regolarizzare e stabilizzare il ciclo anche se solo con il supporto della medicina naturale complementare (omeopatia, agopuntura, fitoterapia ecc.).

BabyComp comunica alla donna già all'inizio del ciclo mestruale, la data della prevista ovulazione ([Foto 4](#)); conoscendo questo giorno si può decidere di avere dei rapporti proprio nei giorni indicati come altamente fertili e quindi ottimali per il concepimento.

Il programma di controllo dell'ovulazione di BabyComp include sia la prognosi dell'ovulazione che il controllo del giorno in cui l'ovulazione è effettivamente avvenuta. Grazie a questo controllo il software definisce la tempistica di scoppio del follicolo, che se non pilotata con farmaci può variare, e quindi riesce a compiere calcoli che riducono per il mese successivo l'eventuale divario tra l'uno e l'altro aumentando così la probabilità di successo.

La donna ha la possibilità di confermare in BabyComp in quali, dei giorni fertili ha avuto un rapporto a fini procreativi ([Foto 5](#)).

Grazie a questa informazione BabyComp conferma già dopo solo 5 giorni dall'ovulazione, se la pianificazione mirata è stata corretta (cioè se il rapporto è avvenuto in prossimità dell'effettiva ovulazione [Foto 6](#)).

Se è in atto una gravidanza sarà sempre BabyComp a informare la donna dopo 15 giorni (probabile gravidanza [Foto 7](#)) e dopo 18 giorni (=sicura gravidanza [Foto 8](#))

Dopo la conferma di una gravidanza in corso BabyComp indica:

- la data esatta di concepimento e
- la data di parto e se sono stati inseriti i rapporti nel periodo fertile, ove possibile,
- la prognosi del sesso del nascituro del bambino ([Foto 9](#))

La donna che ha BabyComp riesce a rimanere incinta con più facilità. Usare l'apparecchio non richiede la conoscenza teorica dei metodi naturali. Le indicazioni dell'apparecchio sono in pratica lo specchio dei mutamenti ormonali del ciclo; attraverso esso la donna impara a conoscere i segreti del proprio ciclo.

Ad oggi sono migliaia di coppie in tutto il mondo che grazie a BabyComp sono riusciti ad avere finalmente il bambino tanto desiderato.

Una volta trascorsi 5-6 mesi senza che la donna sia rimasta incinta, le consigliamo di mettersi in contatto con noi per una stampa dei dati gratuita

che le offre un prospetto riepilogativo di analisi retrospettiva dei cicli, di controllo dell'ovulazione e della pianificazione. Con questi dati la copia riceve ulteriori informazioni importanti

BabyComp, un gioiello tecnologico con tanti informazioni utili

La stampa dei dati

Le informazioni che sono contenute nel prospetto di stampa dati possono naturalmente essere anche utilizzate per il controllo da parte del ginecologo, in relazione agli ultimi cicli (fino ad un massimo di 24 cicli precedenti) e sono:

1. la lunghezza dei cicli memorizzati, ciclo per ciclo
2. la media della lunghezza del ciclo, calcolato su max. 20 cicli *
3. il giorno dell'ovulazione, ciclo per ciclo *
4. la media del giorno dell'ovulazione all'interno del ciclo mestruale calcolato su max. 20 cicli
5. la temperatura della fase ipotermica ciclo per ciclo
6. la media della temperatura della fase ipotermica calcolata su max. 20 cicli
7. la temperatura della fase ipertermica ciclo per ciclo
8. la media della temperatura della fase ipertermica, calcolata su max. 20 cicli
9. l'aumento della temperatura in fase ovulatoria ciclo per ciclo (indicativa anche di un'eventuale instabilità nella fase luteinica)
10. la media dell'aumento della temperatura in fase ovulatoria, su max. 20 cicli *
11. la lunghezza della fase post ovulatoria ciclo per ciclo (indicativa di un'eventuale insufficienza nella fase luteinica del ciclo).
12. la media della fase post ovulatoria su max. 20 cicli *
13. l'indicazione di un eventuale insufficienza e/o instabilità della fase luteinica del ciclo (CLI: Cycle Luteal Insufficiency) ciclo per ciclo (sul display è indicata in percentuale *)
14. l'indicazione ciclo per ciclo di eventuali cicli anovulatori (PO), cioè senza che vi sia stata l'ovulazione (sul display è indicato il numero complessivo *).
15. con l'inserimento dei RS (rapporto sessuale), l'indicazione, ciclo per ciclo, dei cicli in cui la pianificazione mirata è stata corretta (sul display è indicato il numero complessivo *).
16. l'indicazione della data di concepimento *
17. l'indicazione della data di parto *
18. il probabile sesso del nascituro *
19. il grafico della temperatura di tutti i cicli memorizzati con l'indicazione del giorno dell'ovulazione e con riportati i dati dei rapporti sessuali avuti in fase fertile (per un controllo della pianificazione mirata.) vedi [stampa dati](#).

* dati visibili anche sul display di BabyComp

Grazie a queste analisi e controlli si può fare una valutazione sia del ciclo mestruale della donna, con un monitoraggio specifico sia dell'ovulazione che della sufficienza e stabilità della fase luteinica del ciclo, ma anche di come è avvenuta la pianificazione.

Si può fare una valutazione specifica dell'irregolarità, all'interno della quale talvolta si riscontrano dei fenomeni di ripetitività (ad esempio un ciclo lungo e uno corto) e quindi avere indicazioni molto utili e concrete per la

procreazione mirata.

In altri casi, quando ad es. il punto 15 viene sempre centrato, ma i rapporti sono stati troppo frequenti (il controllo dei rapporti avviene grazie all'immissione dei dati che la donna esegue) con una conseguente riduzione della capacità fecondativa degli spermatozoi, la coppia può capire come pianificare meglio.

Cosa che, ad esempio, le coppie che sono consapevoli del fatto che l'uomo ha un problema di ridotta fertilità, possono fare sin da subito, seguendo anche sia le indicazioni riportate sul Libretto di Istruzioni che con il nostro aiuto.

In caso di pianificazione mirata corretta e attenta e ad un ciclo mestruale perfetto l'uomo può decidere se fare uno spermiogramma di controllo e sulla base dei risultati decidere il da farsi, se è necessario che l'uomo assuma un programma di indicazione medica degli integratori specifici o se basta pianificare ancora meglio seguendo le indicazioni di BabyComp.

A questo punto, però, noi della Baby Comp srl desideriamo fare una precisazione:

BabyComp non fa miracoli.

BabyComp è un aiuto prezioso per la pianificazione mirata della gravidanza quando non ci sono impedimenti meccanici al concepimento e quando anche da parte del maschio le prerogative minime vengono soddisfatte.

BabyComp non è assolutamente comparabile a qualsiasi test dell'ovulazione, è un grande aiuto per la donna in età fertile (che abbia 20 anni o 45 a BabyComp interessa poco) per arrivare alla fecondazione del follicolo.

Se sei interessata a capire se LadyComp nelle tue circostanze sarebbe sufficiente oppure se nel tuo caso BabyComp ti darebbe sin da subito maggiori possibilità di successo puoi telefonarci da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 al numero verde gratuito 800 217721 (da fisso) oppure allo 0472 831010 (da cell.)

Test clinici per la procreazione e il [controllo dell'ovulazione](#)

Sicuro: La sicurezza contraccettiva di Pearly, LadyComp e BabyComp è del 99,3%
L'indice Pearl di 0,7 assegnatoci da test clinici indipendenti conferma questo dato.

Per sapere di più vai a: [Sicurezza contraccettiva](#)



Scheda tecnica LadyComp

Descrizione:

indicatore di fertilità computerizzato utilizzabile da qualsiasi donna in età fertile, anche con cicli irregolari, sia come contraccettivo naturale sicuro che per il monitoraggio dell'ovulazione

La Sicurezza Contraccettiva dei giorni indicati come "non fertili" è del 99,3%, comprovata da test clinici indipendenti con un indice pearl dello 0,7.

Utilizzo:

- Semplice: la donna, una volta al giorno, misura in modo sublinguale, con l'apposito sensore, la temperatura basale e immette, quando presente, il dato mestruale.
- Dinamico: l'apparecchio definisce un lasso di tempo per la misurazione di 6 ore che può essere variato dalla donna, sulla base delle sue esigenze.

Caratteristiche:

- Il programma di LadyComp è stato sviluppato dopo un'analisi di oltre 1.000.000 di cicli tenendo conto dei fondamenti medico scientifici sul ciclo mestruale.
- Per garantire una sicurezza pari a quella dei contraccettivi ormonali, il calcolo dell'inizio della finestra fertile del ciclo viene fatto sia tenendo presente la capacità fecondativa degli spermatozoi, che può arrivare fino a 120 ore (=5 giorni), sia l'oscillazione in giorni dell'ovulazione della donna.
- Per la determinazione del giorno di ovulazione e della fase post-ovulatoria viene utilizzata la temperatura basale rilevata con l'apposito termistore, che garantisce una precisione di valore al centesimo di °C.
- Il programma memorizza i dati della donna, calcola i valori medi delle temperature delle diverse fasi del ciclo, compie una serie di elaborazioni biomatematiche e di comparazione tra i dati rilevati e quelli memorizzati, riconosce e scarta automaticamente singoli dati non attendibili (ad es. per febbre). Il "Sistema Neuronale Intelligente" del software fa sì che LadyComp si adatti ai mutamenti ormonali che vi sono con il passare degli anni nel ciclo della donna.
- Da questo complesso quadro di calcoli deriva un'indicazione di fertilità quotidiana valida per 24 ore.
- La prospettiva d'uso è dal menarca alla menopausa.

Altre funzioni:

- **prognosi:**
 - di fertilità per i 6 giorni successivi.
 - della comparsa delle mestruazioni.
 - del giorno dell'ovulazione
- **altre indicazioni sul display:**
 - dati elaborati negli ultimi 180 giorni
 - giorno dell'avvenuta ovulazione
 - di gravidanza dopo 15 (probabile) e 18 (sicura) giorni dall'avvenuto concepimento
- **statistiche del ciclo:**
 - oscillazione in giorni dell'ovulazione
 - numero di cicli memorizzati
 - lunghezza media dei cicli
 - aumento della temperatura in fase ovulatoria
- Memoria dati: fissa 20 anni, temporanea 180 giorni
- **Funzionamento** a batteria, ricaricabile con il suo alimentatore
- Utilizzo senza costi aggiuntivi mensili.
- Dimensioni: diametro 14 cm – altezza 3 cm – peso 200 gr.
- Display luminoso

Servizio aggiuntivo gratuito

stampa dei dati inseriti ed elaborati da LadyComp negli ultimi 180 giorni con analisi della fertilità e del ciclo

Garanzia di 3 anni

Prezzo al pubblico: €512,00 IVA incl.





Scheda tecnica

BabyComp

Descrizione:

indicatore di fertilità computerizzato utilizzabile da qualsiasi donna in età fertile, anche con cicli irregolari, sia come contraccettivo naturale sicuro che per la pianificazione mirata di una gravidanza, il controllo dell'ovulazione e della fase luteinica del ciclo.

La Sicurezza Contraccettiva dei giorni indicati come "non fertili" è del 99,3%, comprovata da test clinici indipendenti con un indice pearl dello 0,7.

Utilizzo:

- Semplice: la donna, una volta al giorno, misura in modo sublinguale, con l'apposito sensore, la temperatura basale e immette, quando presente, il dato mestruale.
- Dinamico: l'apparecchio definisce un lasso di tempo per la misurazione di 6 ore che può essere variato dalla donna, sulla base delle sue esigenze.

Caratteristiche:

- Il programma di BabyComp è stato sviluppato dopo un'analisi di oltre 1.000.000 di cicli tenendo conto dei fondamenti medico scientifici sul ciclo mestruale.
- Per garantire una sicurezza pari a quella dei contraccettivi ormonali, il calcolo dell'inizio della finestra fertile del ciclo viene fatto sia tenendo presente la capacità fecondativa degli spermatozoi, che può arrivare fino a 120 ore (=5 giorni), sia l'oscillazione in giorni dell'ovulazione della donna.
- Per la determinazione del giorno di ovulazione e della fase post-ovulatoria viene utilizzata la temperatura basale rilevata con l'apposito termistore, che garantisce una precisione di valore al centesimo di °C.
- Il programma memorizza i dati della donna, calcola i valori medi delle temperature delle diverse fasi del ciclo, compie una serie di elaborazioni biomatematiche e di comparazione tra i dati rilevati e quelli memorizzati, riconosce e scarta automaticamente singoli dati non attendibili (ad es. per febbre). Il "Sistema Neuronale Intelligente" del software fa sì che BabyComp si adatti ai mutamenti ormonali che vi sono con il passare degli anni nel ciclo della donna.
- Da questo complesso quadro di calcoli deriva un'indicazione di fertilità quotidiana valida per 24 ore.
- La prospettiva d'uso è dal menarca alla menopausa.

Altre funzioni:

- Possibilità di immettere i dati dei rapporti sessuali (per il controllo della pianificazione)
- **prognosi:**
 - di fertilità per i 6 giorni successivi.
 - della comparsa delle mestruazioni.
 - Del giorno ottimale per il concepimento
 - del giorno dell'ovulazione
 - Del sesso del nascituro sia anticipatamente per la pianificazione che a concepimento avvenuto
- **altre indicazioni sul display:**
 - dati elaborati negli ultimi 250 giorni
 - giorno dell'avvenuta ovulazione
 - di gravidanza dopo 5 (possibile), 15 (probabile) e 18 (sicura) giorni dall'avvenuto concepimento
 - data di concepimento
 - data di parto
- **Servizio aggiuntivo gratuito:** stampa dei dati inseriti ed elaborati da BabyComp degli ultimi 250 giorni
- **statistiche del ciclo:**
 - oscillazione in giorni dell'ovulazione
 - numero di cicli memorizzati
 - lunghezza media dei cicli
 - aumento della temperatura in fase ovulatoria
 - lunghezza media della fase post-ovulatoria
 - numero di cicli con pianificazione mirata corretta
 - la % dei cicli con insufficienza nella fase luteinica
 - la % dei cicli anovulatori
 - Memoria dati: fissa 20 anni, temporanea 250 giorni
- **Funzionamento** a batteria, ricaricabile con il suo alimentatore
- **Utilizzo** senza costi aggiuntivi mensili.
- Dimensioni: diametro 14 cm – altezza 3 cm – peso 200 gr.
- Display luminoso



Garanzia di 5 anni

Prezzo al pubblico: €771,00 IVA incl.